

wwellion® **MESH-INHALATOR**

MESH-INHALATOR



REINIGUNG & PFLEGE



Bitte beachten Sie die Pflegehinweise für den Wellion MESH-INHALATOR!

Dieses Gerät enthält empfindliche Komponenten, einschließlich einer Edelstahlscheibe mit genau bemessenen Mikrolöchern. Diese können bei Verwendung von nicht geeigneten Substanzen oder fehlender, nicht ausreichender Reinigung verstopfen. Somit kann nur noch eine geringe oder gar keine Zerstäubung stattfinden oder das Gerät schaltet ab.

Vernebler und Komponenten sind in Kontakt mit dem menschlichen Körper und Sekreten. Regelmäßige Reinigung ist ein MUSS, um bakterielles Wachstum, Infektionen oder eine Fehlfunktion zu verhindern.

Wichtig

- Reinigen Sie alle Teile wie angegeben und nach längerer Lagerung. Wenn Sie das Gerät verwenden während es noch nass ist, kann es Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Waschen Sie den Medikamentenbehälter und die Membran nicht unter fließendem Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Bringen Sie keinen Alkohol oder kochendes Wasser auf die Haupteinheit oder das Kabel!
- Verwenden Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs. Beachten Sie, nach dem Ladevorgang den Micro-USB Anschluss mit der Gummikappe zu verschließen.
- Alle Komponenten müssen nach dem Reinigen vollständig abgekühlt und getrocknet sein!
- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn einer der Teile nicht richtig funktioniert.
- Bewahren Sie das Gerät und die Einzelteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Alle Pflegehinweise finden Sie nochmal ausführlich beschrieben im Benutzerhandbuch!

Eine nicht ausreichende Pflege Ihres Wellion® MESH-INHALATORS kann zu Fehlfunktionen und auch einer Beschädigung des Gerätes führen, für die der Hersteller nicht haftet.

**LESEN SIE DIE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN,
BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN!**

Reinigung und Pflege des Wellion MESH-INHALATORS

Häufigkeit	Ausführung	Hilfsmittel
Nach jeder Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Zur Reinigung der Membran Gerät 2-3 Minuten vernebeln lassen.• Medikamentenbehälter abnehmen und spülen.• Mundstück und Masken mit destilliertem Wasser spülen und mit 75%igem Ethylalkohol abwischen	<ul style="list-style-type: none">• Destilliertes Wasser• 75%iger Ethylalkohol

Täglich	<ul style="list-style-type: none"> • Medikamentenbehälter spülen • Entweder für 15 Minuten in gekochtem destilliertem Wasser – den Behälter nicht direkt mit kochendem Wasser übergießen. Vorsichtig in einen Behälter mit heißem destilliertem Wasser legen. • Oder für 1 Minute in 75%igen Ethylalkohol – danach nochmal mit destilliertem Wasser spülen 	<ul style="list-style-type: none"> • Destilliertes Wasser • Schale mit heißem destilliertem Wasser oder 75%igem Ethylalkohol • Sauberes und trockenes Handtuch
Nach jeder 9. Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Medikamentenbehälter mit destilliertem Wasser spülen • 3ml 60%ige Essigsäure (Entkalker) in den Behälter geben und für 5-10 Minuten vernebeln lassen. • Danach nochmal mit destilliertem Wasser spülen 	<ul style="list-style-type: none"> • Destilliertes Wasser • 60%ige Essigsäure
1x Jährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Austausch des Medikamentenbehälters und der Mundstücke 	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzkit für Wellion MESH-INHALATOR